

# DERSANI

## HIDROGEL

### **Dersani Hidrogel**

Gel Hidratante

Dersani® Hidrogel é um gel hidratante, estéril e destinado ao tratamento de feridas. Possui em sua formulação ácidos graxos, vitaminas A e E, propilenoglicol, edetato dissódico, carbômer, hidróxido de sódio e água purificada, capaz de promover a hidratação da ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico.

**Indicação:** Dersani® Hidrogel auxilia a cicatrização de feridas secas, periféricas ou profundas, com ou sem infecção, com necrose ou esfacelo, causadas por: úlceras venosas, arteriais e por pressão, queimaduras de primeiro grau e de segundo grau de pequena extensão com perda parcial ou total de tecidos e áreas pós-trauma. **Mecanismo de Ação:** A manutenção do meio úmido tem como objetivo estimular o processo de cicatrização e o amolecimento de possíveis tecidos desvitalizados. Os Ácidos Graxos são capazes de promover alta hidratação da ferida estimulando o processo de cicatrização.

**Modo de usar:** O tratamento de feridas com Dersani® Hidrogel deve ser monitorado por um profissional da saúde que deverá aplicar o produto de maneira higiênica e com luvas para garantir segurança tanto do profissional quanto do paciente. 1. Irrigar bem o leito da lesão com solução fisiológica a 0,9% ou conforme protocolo da instituição; 2. Limpar a pele ao redor e secar bem; 3. Aplicar Dersani® Hidrogel diretamente no leito da ferida, não excedendo o nível ao redor da ferida; 4. Ocluir a ferida com um curativo secundário estéril e fixar. Para efetuar a remoção do produto deve-se irrigar o leito da ferida com solução fisiológica. **Frequência das trocas:** A frequência das trocas do curativo deve ser monitorada por um profissional da saúde e não deve exceder 72 h (setenta e duas horas). Dersani® Hidrogel deve ser trocado quando o curativo secundário apresentar sinais de saturação ou em trocas rotineiras. Para feridas infectadas, realizar a troca em, no máximo, 24 h (vinte e quatro horas).

**Precauções:** Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada. Em casos de irritação ou sensibilidade (reação alérgica) durante o uso de Dersani® Hidrogel, suspenda a utilização e consulte um profissional da saúde.

**Armazenamento:** Dersani® Hidrogel deve ser armazenado na embalagem original, à temperatura ambiente (15 °C – 30 °C), ao abrigo da luz e umidade. Deve-se evitar refrigeração.

**Fabricado por:** Laboratório Daudt Oliveira Ltda. Rua Simões da Mota, 57 – Rio de Janeiro – RJ. CEP 21540--100. CNPJ 33.026.055/0001-20. Resp. Técnico: Roquele Gomes Focco CRF/RJ 7193. REG. MS. 80219190002. Indústria Brasileira.

**Sob licença de:** Saniplan Laboratórios Ltda. CNPJ 01.107.389 /0001-31. Registro Anvisa nº 80219190003



SAÚDE DESDE 1882